



CPR-LOON

Cardiopulmonary Resuscitation - Training balloon

골든타임 “4분의 기적” 심폐소생술 스파이더맨

심정지가 발생하고 4분이 지나면 뇌에 혈액 공급이 끊기게 되어서 뇌 손상이 진행되며
심정지 발생 후 1분 이내에 심폐소생술을 실시했을 경우에 환자의 **생존률이 97%**에 달한다고 합니다.

심폐소생술 스파이더맨으로

“시청각 교육에서 벗어나” “직접 체험하는 반복적인 교육”을 통해
근로현장에서 뿐 아니라 가족, 이웃에게 위험 상황에도 잘 대응할 수 있는 교육이 되었으면 합니다.



나도 해보고 싶은데
언제 내 차례가 올까~~



정확한 압박을 하면
소리가 납니다.

심폐소생술 스파이더맨 으로 해결하세요.

저렴한 가격으로 많은 인원이 동시에 교육&체험을 할 수 있어 효율적입니다.

사용 시에는 공기를 불어넣고, 사용 후에는 공기를 빼서
기존의 마네킹 제품에 비해 부피가 적어 보관과 휴대가 용이합니다.

CPR-LOON은 가슴압박 소생술을 지원하는 학습교구로 값 비싼 마네킹 없이도
누구나 심폐소생술의 핵심적인 부분인 가슴압박을 정확하게 익힐 수 있는 교구입니다.



Cardiopulmonary Resuscitation - Training balloon

생명을 살리는 3-STEP!!



1. INFLATE

CPR-LOON의 공기주입구에 빨대를 삽입하여 공기를 뽕뽕하게 불어 넣습니다.



2. SET

CPR-LOON을 매트 위에 놓고 하트마크에 양손을 걸쳐 올려줍니다.



3. PUSH

CPR-LOON을 1분에 100~120회 속도로 계속 눌러 주세요.



매트
600x1100mm

CPR론 -스파이더맨
380x550mm



가슴 압박법 (Hand-only CPR)
위주의 교육
(일반인 CPR 권고사항)



압박의 핵심요소에
관한 피드백



개인별 실습에 최적화된
형태와 제품사양

CPR-LOON은 가슴압박 소생술을 지원하는 학습교구로 값 비싼 마네킹 없이도 누구나 심폐소생술의 핵심적인 부분인 **가슴압박**을 정확하게 익힐 수 있는 교구입니다.